

Monte la muleta INDESmed en 5 sencillos pasos

1. Coloque la Contera (1) en la parte inferior de la muleta, y presione firmemente hasta que quede encajada.

2. Deslice el Mango (2) hasta la posición en la que se sienta cómodo, de acuerdo a su anatomía; (Para empezar, pruebe situándolo en medio de la zona curva).

Con la llave allen, apriete suavemente el punto de anclaje (A). (Gire la llave allen en el sentido de las agujas de reloj).



¡OJO! Apriete cuidadosamente y sólo hasta que note que le cuesta un poco seguir girando.



3. Coloque la Abrazadera (3) en la parte superior de la muleta y deslice hasta el punto en el que se sienta más cómodo.

Con la llave allen, apriete suavemente el punto de anclaje (B) hasta que note que le cuesta un poco seguir girando.



¡OJO! Coloque la abrazadera con la zona curvada hacia el suelo.



4. Pruebe que la distancia del mango y de la abrazadera es correcta y cómoda; sino es así, ajuste ambas posiciones de nuevo, deslizando los elementos (1) y (3) sobre la curva de la muleta.

5. ¡Comience a disfrutar de la muleta más ligera del mundo! Y cuéntenos su experiencia mandándonos un correo electrónico a info@indesmed.com

Puede descargar las instrucciones a color en: <http://www.indesmed.com/datasheet/montaje.pdf>