

# Gehgestell - Gehbock

Stabiler Gehbock mit Rädern aus Flugzeug-Aluminium

Belastbarkeit: 100 kg



Für Innenbereich und Rehabilitation

sicher – ergonomisch – klappbar - leicht

Entworfen und hergestellt von VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spanien

[Gehgestell - Gehbock INDESmed](#)

Kundenservice: [Kontakt@INDESmed.com](mailto:Kontakt@INDESmed.com)

## Leichtes und stabiles Gehgestell (Gehbock) für Innenbereich und bei der Reha

Das Ultraleichte Gehgestell (Gehbock) von INDESmed ist eine stabile Gehhilfe um sich sicher in Ihrem Zuhause oder bei der Reha zu bewegen.

**Gehgestelle – Gehböcke** werden vorwiegend als eine Alternative zum Rollator bei Rehabilitationstherapie und bei Innenräumen eingesetzt und werden deshalb auch als **Indoor-Rollator** bezeichnet. Bei starken Unsicherheiten beim Gehen oder schwachen Personen kommen diese Gehhilfen besonders gut zum Einsatz, da sie sehr **stabil** sind und dem Nutzer durch das **kipp-sichere Abstützen** beruhigende Sicherheit vermitteln.

Mit seinen 2,8 kg Gewicht und nur 57 cm Breite, ist das Gehgestell aus Flugzeug-Aluminium von INDESmed ein zuverlässiges Hilfsmittel, um die Mobilität nicht zu verlieren.

Bei dem Design unserer Gehböcke haben unsere Ingenieure vor allem nach dem **Optimierten Schwerpunkt** gesucht, damit **Stabilität und Sicherheit** gewährleistet bleiben. Je weiter die Griffzone vom Schwerpunkt entfernt ist, desto größer wird die Instabilität des Benutzers. Deshalb begünstigt die auf den Schwerpunkt des Benutzers abgestimmte Griffzone vom Gehgestell von INDESmed deutlich die Stabilität und damit die Sicherheit.

Das Gehgestell von INDESmed ist **leicht klappbar**. Gefaltet beträgt sein Ausmaß nur -73×56×20 cm-, was den Transport und die Lagerung erleichtert.

### Ergonomisch, höhenverstellbar.

Mit einer Verstellung, die von 75 bis zu 95 cm Höhe reicht, ermöglicht sie eine **aufrechte Haltung** der Wirbelsäule und eine schnellere Rehabilitation. Der Benutzer bewahrt die **natürliche Position der Handgelenke**, wodurch Sehnenentzündungen und Läsionen verringert oder beseitigt werden können.

Das Gehgestell von INDESmed ist leicht faltbar. Gefaltet beträgt sein Ausmaß nur -73×56×20 cm-, was den Transport und die Lagerung erleichtert.

Der Gehbock von INDESmed ist in **zwei Farben** erhältlich: Lila und Blau.

### Technische Daten

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Höhenverstellung</b>      | von 75- bis 95cm.   |
| <b>Ausmaß gefaltet</b>       | 73×56×20 cm         |
| <b>Durchmesser Rad</b>       | 20cm.               |
| <b>Breite</b>                | 57,5 cm inkl. Räder |
| <b>Gewicht</b>               | 2,8kg.              |
| <b>Belastbarkeit max.</b>    | 100kg. max.         |
| <b>Tasche (opt. Zubehör)</b> | 500 gr, 10 l Inhalt |

Besuchen Sie unsere Webseite: [Gehgestell](#)